

Gebruikershandleiding



WEBSITE

www.banobenelux.nl

CONTACT

0184 - 785353

info@banobenelux.nl

ADRES

Schooldwarsstraat 48
3351 AT in Papendrecht
Nederland

www.bano-toilet douche.nl

Lees de handleiding zorgvuldig voor gebruik

- 01. Veiligheidsmaatregelen
- 02. Configuratie
- 03. Hoe te gebruiken
- 04. Installatie
- 05. Features
- 06. Onderhoud
- 07. Indien het product niet te gebruiken voor een lange periode
- 08. Troubleshooting
- 09. Specificatie
- 10. Garantiocertificaat

Veiligheid controle

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN DE TRIPEL B

Algemene opmerking

Bij gebruik van elektrische apparaten, dienen de instructies altijd in acht te worden genomen. Hier volgen enkele algemene adviezen t.b.v. de veiligheid.

Zorgvuldigheid bij het aansluiten en gebruik:

Om het risico op ongelukken uit te sluiten, bij het gebruik maken van elektrische apparaten, adviseren wij u alle opmerkingen en waarschuwingen in de handleiding in acht te nemen, dit om bv. brand, persoonlijk letsel, materiële schade, of ook schade aan de Tripel B, te voorkomen.

- Gebruik nooit een beschadigde of loszittende wandcontactdoos en vervang deze door een goed gemonteerde wandcontactdoos, om de Tripel B na installatie aan te sluiten.
- Sluit in het algemeen niet meer dan één apparaat op deze wandcontact aan dan alleen de Tripel B. Dan bent u zeker dat u de aansluitwaarde van de wandcontactdoos niet overschrijdt.
- Voordat je de Tripel B wegneemt, door de oranje knop in te drukken en de zitting weg te schuiven, moet je altijd eerst de stekker uit de wandcontactdoos halen.
- Verwijder nooit de stekkers uit een wandcontactdoos met natte handen.
- Maak geen scherpe knik in het netsnoer. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Dit om beschadigingen aan het netsnoer te voorkomen.
- Als u de Tripel B wilt schoon maken, gebruik altijd en uitsluitend een vochtige zachte doek. Wij adviseren u om dan eerst de stekker uit de wandcontactdoos te nemen. Dit is bij het schoonmaken van de zitting niet nodig.
- Gebruik een wandcontactdoos dat geschikt is voor minimaal een vermogen van 800 Watt bij 230 VAC. (zie opdruk op de wandcontactdoos)
- Als het netsnoer van de Tripel B is beschadigd, moet het worden vervangen door de service-dienst van de fabrikant, of door een gekwalificeerd reparatie bedrijf.³

Belangrijk! Volg deze Adviezen op.

Adviezen om het risico op ongelukken bij het gebruik van elektrische apparaten in het algemeen te voorkomen.

Als een product, dus ook bij de Tripel B, “vreemde geluiden” gaat maken, een brandgeur of rook produceert, neem dan onmiddellijk de stekker uit de wandcontactdoos.

Steek nooit een draad of ander scherp voorwerp in ventilatieopeningen van een apparaat, dus ook niet bij de Tripel B. Dit zou kunnen leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de Tripel B.

Bewerk nooit met hete apparaten de kunststofdelen van de Tripel B (zoals lucifers, brandende sigaretten, een hete föhn etc.). Dit kan tot vervorming van het kunststof leiden en uiteindelijk brand veroorzaken. Ook wordt de onzichtbare anti-bacteriële laag op de zitting en andere delen beschadigd.

Belangrijke informatie over ruimten waar een toiletpot is geplaatst en waar nooit een Tripel B gemonteerd mag worden!

Plaats de Tripel B nooit op een toilet dat is geplaatst, daar waar ook de douche of tapkraan boven de toiletpot staat. De Tripel B mag nooit op een natte plek als deze worden gemonteerd.

Plaats nooit de Tripel B op toiletpotten in ruimten waar continu een relatieve vochtigheid heerst van > 95.5 heerst. Bijvoorbeeld in sauna's, stoombaden en andere van dit soort ruimten. Het kan grote schade aan de Tripel B veroorzaken op langere termijn. Ook vervalt de garantie

Algemene adviezen voor de gebruiker die hulp of toezicht nodig heeft en mogelijk door toezicht van begeleiders moet worden geholpen bij ingebruik name en/of gebruik.

- Blokkeer nooit de uitgang van de Föhn. (klepje moet vrij kunnen bewegen)
 - Houdt supervisie als kinderen de Tripel B voor het eerst gaan gebruiken (geldt ook voor hulpbehoevenden) en stel vast wat zelfstandig mogelijk is.
 - Lees de gebruikssticker die in de nabijheid van de Tripel B is / kan worden geplakt of lees de handleiding. (Voorlezen is een probaat middel)
 - Blokkeer nooit de lucht-inlaat (rooster / openingen) aan de achterzijde van de Tripel B en pas op dat hier geen handdoeken of andere belemmeringen voor hangen.
 - Stop nooit dingen in de luchtopening of aansluit slangen, die er niet horen.
- Ga niet sprayen met spuitbussen (aerosols) in de nabijheid van het rooster van de luchtinlaten van de Tripel B die brandbare drijfgassen of inhoud hebben.

Let op dat u nooit:


- De heetwater leiding op de Tripel B aansluit of heeft aangesloten.
- Controleer of alle wateraansluitingen naar de Tripel B niet lekken.
- Indien u staande urineert: plas nooit over de sproeikop als deze zich in “de garage” bevindt, of over alle andere onderdelen van de Tripel B, zoals de zitting, behuizing en klep.
- Doe de klep altijd eerst omhoog. Andere gebruikers zullen dit hogelijk waarderen (zie notie op blad 5 met ideeën en waarschuwingen).
- Sluit de kraan af en trek de stekker uit de wandcontactdoos als u langer dan 2 weken de Tripel B niet gebruikt (dit is energie besparend). Trek niet de aansluit slang met grote kracht uit de insteek koppeling, maar druk eerst op de ring en blijf deze dan ingedrukt houden om de slang daarna (de borging wordt dan vrij gegeven) simpel met weinig kracht uit de insteek koppeling te trekken.
- Trek nooit de stekker aan het aansluitsnoer uit de wand contactdoos.

Begeleid altijd de gebruikers, die niet zeker zijn met het gebruik van de Tripel B, dus gebruikers die mentale of fysieke problemen hebben. Geef deze gebruiker altijd de gewenste hulp bij het eerste gebruik, of als zij erom vragen, of indien u het noodzakelijk acht.

Elektrische installeren en goede aarding

De Tripel B mag alleen worden gebruikt met een wandcontactdoos, een gecontroleerde perfecte aarding en een aardlekschakelaar in de huisinstallatie. Het aansluitsnoer is een 3 aarderige kabel.

De Tripel B is uitgerust met een kabel met stekker met randaarde, die gekeurd is voor een aansluiting op nominaal 110 VAC en 230VAC en 50 Hz. De groep moet afgezekerd zijn met minimaal een 15 ampère-zekering. Meestal zijn de wandcontactdozen in natte ruimten ook nog beveiligd met een scheidings-transformator. Bij een ondegelijke wandcontactdoos of aansluiting, moet je dit eerst herstellen, alvorens de Tripel B aan te sluiten.

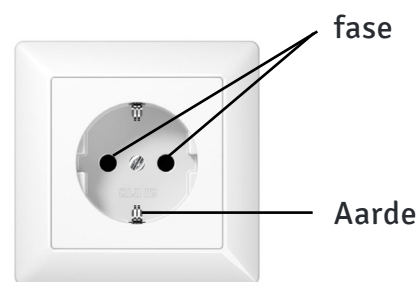

Verlengsnoer

Indien het nodig is om met een verlengsnoer de Tripel B aan te sluiten op een wandcontactdoos binnen de natte ruimte (of beter: buiten de natte ruimte), gebruik dan een goedgekeurd verlengsnoer met een goed geaarde stekker en contra-stekker. (alles 3 aarden en geschikt voor minimaal 16 Amp).

Veiligheidsvoorzorg- maatregelen.

Gebruik de Tripel B niet als deze niet goed zou werken. Kijk eerst wat er de oorzaak van zou kunnen zijn, of contact anders onze service afdeling.



Bij een te lage waterdruk < 1,5 bar, zet het water op koud. Sluit de tapkraan op het T-stuk en zet warm water op koud.
(Blauwe LED, warm water is uit)



Sluit de Tripel B altijd op 230VAC / 50Hz. Gebruik altijd een goed gekeurde huisinstallatie om de Tripel B aan te sluiten. Dit is verplicht in natte ruimten en is meestal aanwezig.



Demonteer nooit zelf de Tripel B. Repareer of verander iets aan de zitting.



Sluit nooit direct water op de zitting en plaats de Tripel B nooit onder een douche. Dit kan tot schade leiden!



Gebruik bij het reinigen nooit agressieve zeep en andere agressieve schoonmaakmiddelen. Gebruik alleen zachte zeep en een zachte vochtige doek.



Houd nooit brandbare producten in de directe omgeving van de Tripel B. De kunststof is brandvertragend maar niet onbrandbaar.



Ga nooit op de zitting staan en plaats nooit zware producten op de zitting om vervormingen en erger te voorkomen.



Controleer of er geen knikken in de waterleiding en wateraanvoer naar de Tripel B zijn. Zo ja, verbeter dan de aansluiting.




Gedurende een lage waterdruk (< 1,5 bar) en de watertemperatuur staat op warm, zet deze dan direct op koud om een te hoge warmwater temperatuur te voorkomen. Er zijn wel veiligheidsmaatregelen in de Tripel B genomen, wanneer er geen water of een veel te lage druk aangeboden wordt. De Tripel B start dan niet op.







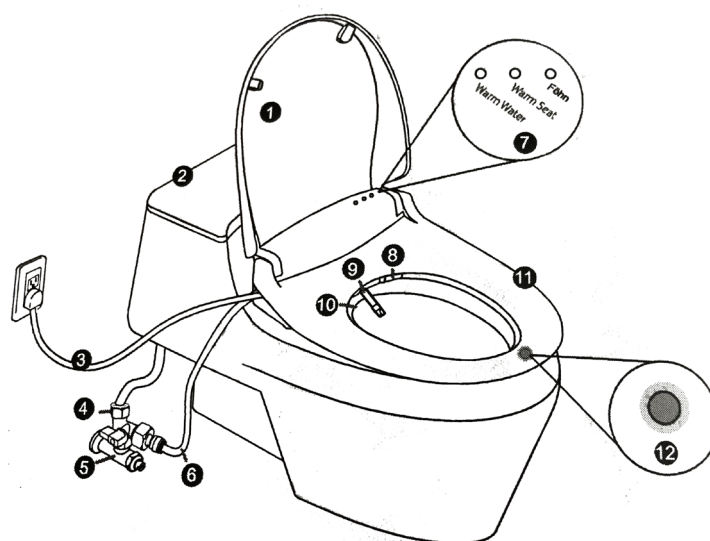






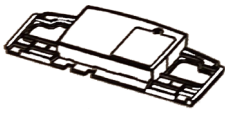


Als de Tripel B voor lange aaneengesloten tijd (bv. > 2 weken) niet wordt gebruikt, neem dan de stekker uit de wandcontactdoos en sluit de kraan op het T-stuk. Doe hetzelfde als het aansluit snoer is beschadigd. Sluit de Tripel B altijd op een goede randaarde wandcontactdoos en controleer of de aarde correct is.

De onderdelen



- | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Klep | 5. Hoofd waterkraan | 9. Douchesproeier |
| 2. Toiletpot | 6. Waterslang 7.3mm | 10. Blauwe verlichting |
| 3. Aansluitsnoer | 7. LED instelling aanwijzing | 11. Zitting, sensor |
| 4. T-stuk met kraan | 8. Klepje uitlaat föhn | 12. De enige knop (blauw/rood) |

Accessoires

Handleiding	Montageplaat		T-stuk wateraansluiting		
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	 x2	 x2	 x1	 x1	 x1
	 x2	 x2			
	 x1		 5 cm x 1  125cm x 1		

Bediening


Functie	Hoe de Tripel B in te stellen
Sproeikop spoeling en droging met lucht door föhn.	<p>Stel de gewenste modus in met de blauwe knop. Wanneer u gaat zitten, wordt de knop rood. Druk op de knop nadat u datgene heeft gedaan waarvoor u kwam. Klaar? druk dan op rode knop. De sproeikop schuift naar voren en gaat wassen gedurende 3 minuten. Korter gewenst kan ook. Druk dan opnieuw op de rode knop. De föhn gaat nu werken, ook 3 minuten. Als u opstaat stopt de Tripel B automatisch. U kunt ook eerst op de rode knop drukken en dan opstaan.</p>
<p>Instellen van de temperatuur van het water, de föhn en zitting. Er kan niets fout gaan, dus herhaal de actie een paar maal om de juiste handeling goed te kunnen.</p> <p>Wanneer je 3 seconden de knop indrukt knippert het LED bij de tekst. De drukknop blijft blauw, wacht 7 seconden en de LED gaat uit. Drukknop wordt rood na 3 seconden kort indrukken en wachten tot LED weer continu aan is.</p>	<p>1. Om in het programma voor de settings te komen: Druk en houdt de blauwe bedieningsknop gedurende 3 seconden ingedrukt tot de gewenste blauwe LED gaat knipperen. Als de knop rood wordt druk de knop nogmaals in en wacht 5 seconden. De Led blijft aan en u heeft warm water/zitting/föhn.</p>  <p>2. Druk de knop opnieuw 3 seconden in en selecteer de gewenste knop. LED knippert blauw en blijft blauw. Na 5 seconden is de temperatuur warm. Druk de knop opnieuw in tot automatisch de volgende LED gaat knipperen en herhaal de actie tot u alle drie de LED's in de gewenste kleur hebt ingesteld. De logica is sequentieel. Alle LED's branden blauw: water/zitting/föhn zijn warm. Één Led uit dan is die koud.</p> <p>3. Of druk de knop opnieuw in en en wacht tot de volgende LED indicatie gaat knipperen en volg dan de actie beschreven onder 1 of 2.</p> <p>4. Als alle LEDs niet meer knipperen en branden, dan is de gewenste instelling in deze stand koud(omgevingstemperatuur). Wilt u alsnog de instelling veranderen, zodat toch de gewenste instellingen in de stand warm staan, dan zijn alle LED's aan. Standaard instelling bij opstart. Druk de enige drukknop kort in als deze blauw is. U staat dan nog steeds voor de Tripel B en het licht gaat aan of uit als u weer drukt.</p>

Drukknop	LED Blauw uit	LED Blauw
Water/zitting temperatuur	Omgevingstemperatuur	Temperatuur (37° celsius +- 2 °)
Water/zitting temperatuur	Omgevingstemperatuur	Temperatuur (37° celsius +- 2 °)

Installatie instructie

Stap 1. Verwijder uw bestaande toiletbril

Zitting en klemp (gedempt)

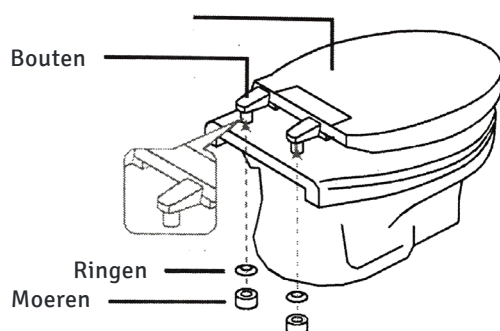


Sluit de watertoevoer af en leeg het waterreservoir.



Bestaande afsluitkraan.


Stap 2. Installeer de grondplaat Plaats de montage plaatjes zodanig dat deze **precies** overeen komen met de gaten in het toilet.

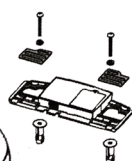

- Schroeven
- Ringen
- Montageplaten
- Grondplaat
- Platic pluggen

Stap 3. Sluit slang aan De T-klep moet zorgvuldig in de aanvoerleiding worden gemonteerd. Daarna de slang op lengte maken en in de wartels duwen.

Sluit de slang aan
tussen T-klep en de
Tripel B aan tussen de
aanvoerleiding.

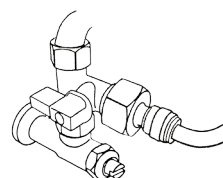


* Dubbelzijdige tape is niet meegeleverd. Plak eventueel 2 strippen van 10 cm. aan de onderzijde van de grondplaat. Maak daarna de toiletpot vochtig op de plaats waar de grondplaat komt. Dit voorkomt dat de tape direct vastplakt is op de toiletpot en u de grondplaat nog kunt schuiven. Na 24 uur zit de tape goed vast op de toiletpot.

Stap 4.

Verwijderen en plaatsen van de Tripel B t.b.v. het reinigen.



Schuif de Tripel B in de montageplaat. U hoort een klik zodat de Tripel B goed is geplaatst. Bij verwijderen van de Tripel B druk de oranje knop aan de zijkant in (ingedrukt houden) en trek de Tripel B naar voren.

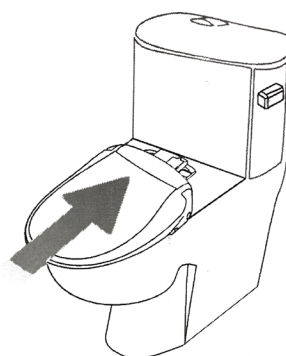

Stap 5.

Het testen.

Draai de T-klep open en steek de aansluitkabel in de wandcontactdoos. Na ca. 15/30 seconden licht de éénknopsbediening op. Een piep wordt hoorbaar als de Tripel B klaar is om te worden gebruikt. Als de sproeier mocht gaan werken, zonder bedient te zijn, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, wacht 20 seconden en steek de stekker opnieuw in de wandcontactdoos. (Reset actie)

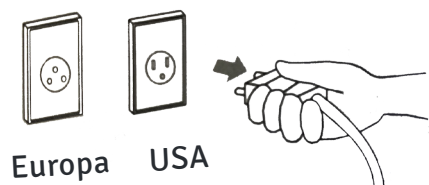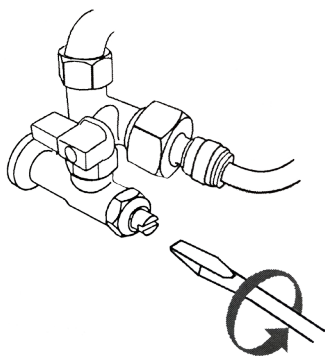

- Overtuig u ervan dat de sensor op de zitting u heeft gedetecteerd (de blauwe knop wordt dan rood). Wrijf uw hand over het rechterdeel van de zitting en de knop wordt rood.

- Sproeikop reiniging en UV sterilisatie.

Als de sproeikop in de garage is wordt deze voor en na gebruik automatisch gereinigd door de waterspoeling. Ook zullen de UV -LED's nog tot 3 minuten steriliseren als de gebruiker de Tripel B heeft verlaten. (UV licht is onzichtbaar)


- Lage waterdruk.

Bij een te lage waterdruk < 1,5 bar, zal het water in de warm mode warmer worden dan ingesteld. Zet het water dan in de mode uit. Informeer bij u waterleverancier waarom de waterdruk zo laag is en deze wil aanpassen tot >1.5 bar.

- Check de volgende punten eerst als er een storing is.

Waterdruk: controleer of de waterdruk normaal is. > 1,5 bar of beter. Hoofdkraan: controleer of de hoofdkraan volledig is geopend.

T-stuk: Verwijder het witte deel van het T-Stuk en controleer het filter of dit schoon is (sluit eerst de kraan op het T-stuk en na controle vergeet dan niet deze weer te openen).

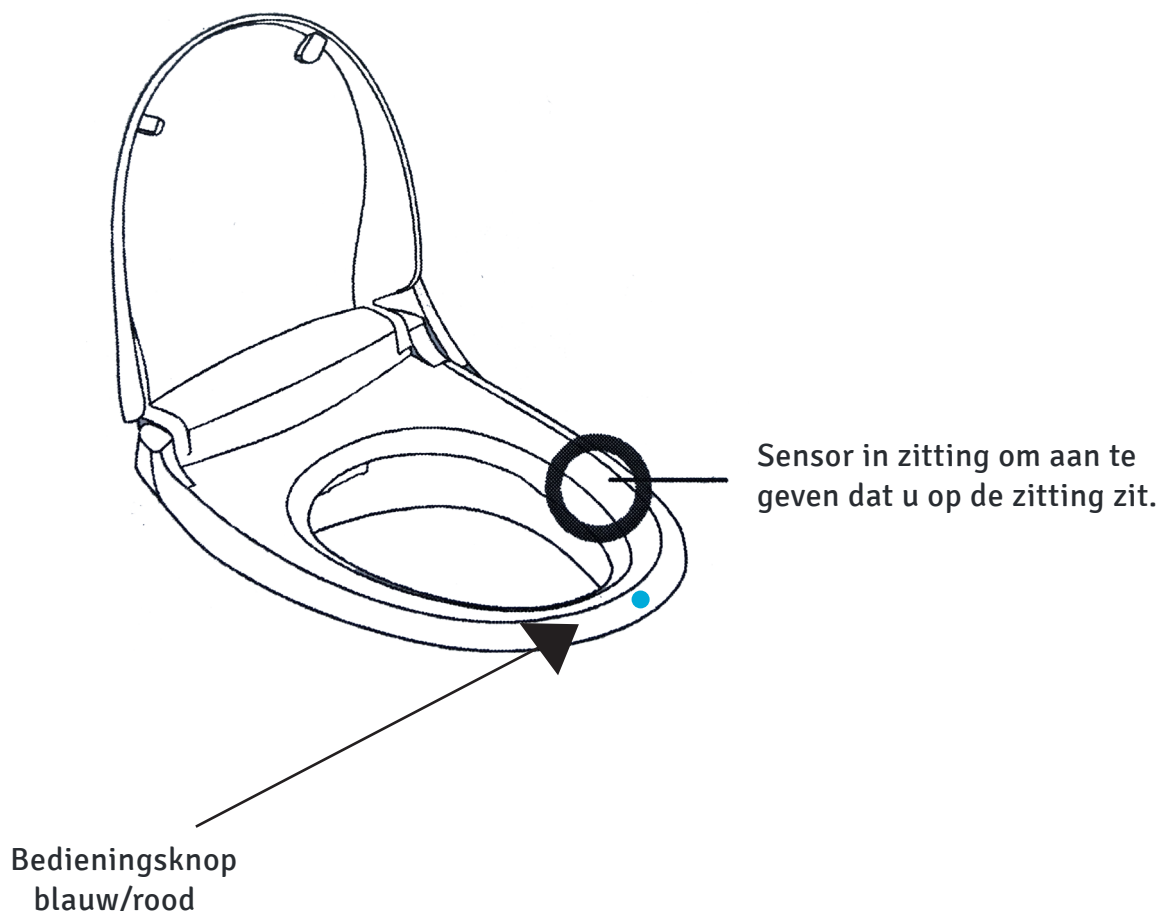

kenmerken

De eenknopsbediening werkt alleen naar behoren als de gebruiker de instellingen goed heeft gedaan en de Tripel B correct is geïnstalleerd.




De sproeier.
De sproeier met een sterke waterstraal reinigt de bibs grondig




Past op (bijna) alle toiletten.
De Tripel B past op de meeste bestaande toiletten. De montage plaat en de keus voor de ronde of ovale zitting maken dat de zitting bijna altijd goed past.




Het één ontwerp.
De sproeier wordt in de "garage" schoongewassen en door UV LED's ontsmet.

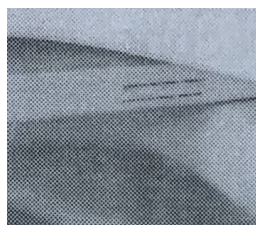


De föhn.
De lucht die na het wassen wordt geblazen maakt uw billen droog. Ondanks de verwarming voelt deze lucht fris aan. Mede hierdoor is toilet papier overbodig.

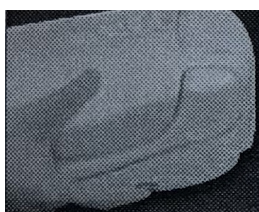


Zitting snel verwijderen.
Druk de oranje knop in en houdt deze ingedrukt. Dan met beleid de zitting naar voren van de montageplaat wegtrekken. Het plaatsen gaat in omgekeerde volgorde.

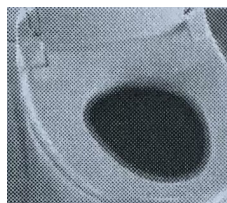

De verwarmde zitting.
De verwarmde zitting kan ook individueel worden ingesteld. Zie de drie LED's.

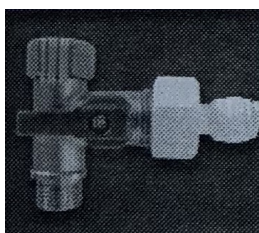

Het T-stuk monteren.
Het T-stuk plaatsen tussen de hoofdwaterleiding en de stortbak. De insteek connector met filter voor de 7,3 mm. leiding wordt dan daarin geschoven.

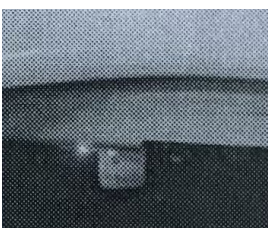

Nacht / dag verlichting.
Deze kan worden in en uitgeschakeld met de enige blauwe knop. Het zoeken naar de lichtknop is lastig. De verlichte toiletspot heeft hiervoor een de oplossing.



Anti bacterieel materiaal.
De sproeikop en de zitting zijn van 'n speciaal kiem-bestrijdend kunststof gemaakt. Dit geeft tot 98% bescherming tegen foute bacteriën.



Unieke UV sterilisatie.
De nieuwe UV LED's zorgen er voor dat de schadelijke bacteriële kiem bestrijding voor 98% worden gedood. Dit is bv. voor aambeï patiënten (haemeroïds) een belangrijk bijdrage voor herstel.



Gedempt bewegen van de klep en de zitting.
Het design is zo gemaakt dat de klep en zitting zachtjes en zonder lawaai van verticale in de horizontale stand komt.

Onderhoud

Waarschuwing!

Spuut nooit water of agressieve schoonmaakmiddelen op de zitting en de andere kunststof delen van de Tripel B. Plaats de Tripel B altijd in een goed geventileerde omgeving en niet daar waar bv. douche water over de Tripel B kan stromen. Dit beschadigt de anti bacteriële laag op de zitting en ook de elektronica.

1. Het schoonmaken van de zitting


Met een zacht schoonmaakmiddel op een zachte doek kunt u voorzichtig de zitting reinigen. Dit kan ook met een verdunning van 75% water/ alcohol. Beschadig niet de anti kiem laag ! (bacterie dodend)

2. Reiniging van de toiletpot als de Tripel B is weggenomen.


- Druk op de oranje blokkeer-knop en houdt de zitting terug ingedrukt, tot de Tripel B is verwijderd.
- Trek de Tripel B met ingedrukte oranje knop van de montageplaat.
- Zet de Tripel B opnieuw tegen de montageplaat en zorg ervoor dat de Tripel B goed op de montageplaat schuift tot het geluid van de klik geklonken heeft.

3. Het schoonmaken van de sproeikop

Met een zacht schoonmaakmiddel op een borstel (bv. een tandenborstel) voorzichtig de sproei-kop reinigen. Dit als er b.v. vuil is afgezet dat in de garage niet is verwijderd. Dit komt zelden voor.

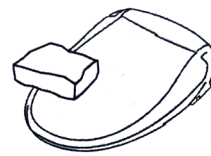


Plaats de zitting terug

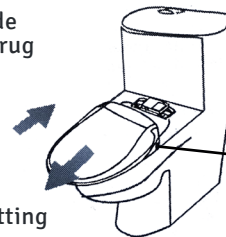

Neem de zitting af van de montageplaat

Oranje vrijgave knop

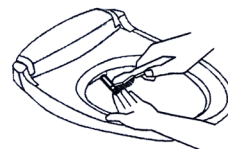

Belangrijke mededeling voor de heren.


Als u gebruik maakt van het toilet om te urineren, klap dan de zitting van de Tripel B omhoog. De dames zullen u dankbaar zijn. Een andere mogelijkheid is om zittend te urineren, hetgeen erg hygiënisch is, ook als de dames gebruik van het toilet willen maken. Als er resten van de urine op de zitting van de Tripel B achterblijven en deze later worden verwijderd, kan ook de anti bacteriële laag worden beschadigd. Onze technische dienst kan dit vaststellen en de garantie op de Tripel B is dan vervallen.

In het geval dat de Tripel B voor een lange periode niet is gebruikt, volg dan deze instructie. Het is altijd beter, dat als u de Tripel B niet gebruikt (vakantie periode), om de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.

Volg de hieronder genoemde stappen.


Stap 1

Neem de stekker uit de wandcontactdoos

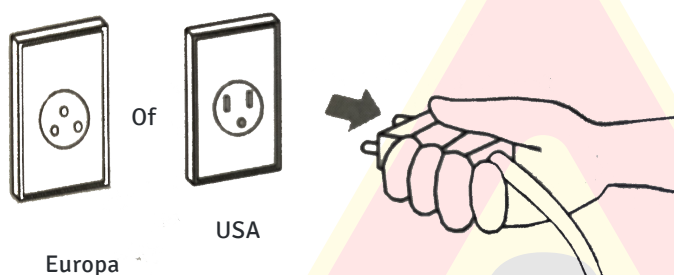

Stap 2

Sluit de waterkraan af op het T-stuk, of sluit de de hoofdkraan af.

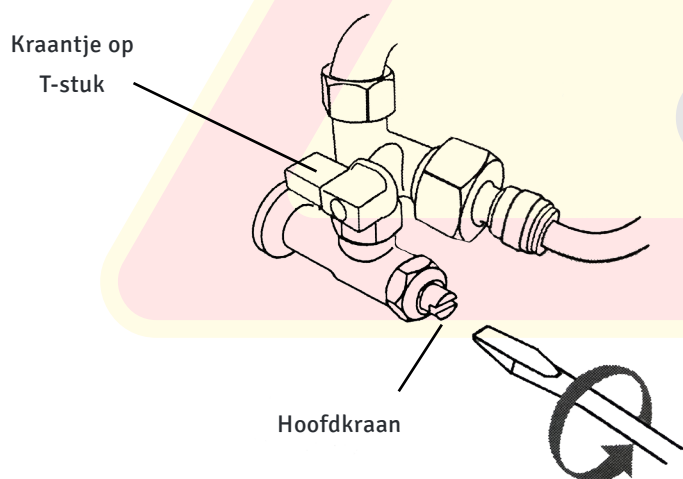

Opnieuw in gebruik stelling.

Stap 1

Open de water toevoer. (hoofdkraan of kraan op het T-stuk)

Stap 2

Steek de stekker van het aansluitsnoer weer in de wandcontactdoos

Probleem oplossen

Controleer eerst de volgende opmerkingen, voor de klantenservice bereiken en te bevragen. Zie ook pagina 17.

Storing	Mogelijke fout	Oplossing
Druk op de knop van Tripel B werkt niet goed	Is de Tripel B aangesloten op de netspanning? Controleer dit.	Controleer of er spanning op de wandcontactdoos aanwezig is en steek de stekker opnieuw in de wandcontactdoos.
Lage waterdruk of geen waterdruk .	Waterkraantje staat dicht. Waterleiding is geknikt of verstopt. Sproeikop is verstopt. Filter in het T-stuk verstopt.	Open het waterkraantje. Neem knik weg. Sproeikop schoonmaken. Filter in het T-stuk (witte deel) schoonmaken.
Douche stopt onverwacht.	Douchetijd voorbij. (max 3 minuten). Gebruiker is anders gaan zinnen Stroom uitval	Alleen bij stroomuitval: reset het systeem door stekker uit te nemen en na 120 seconden weer in te steken. Ga zitten druk de rode knop weer in.
Zitting blijft koud of is koud.	Kijk of LED blauw is. Zo niet dan opnieuw procedure zitting warm opstarten.	Reset en opnieuw procedure. LED uit = koud, LED blauw = warm (zie settings)
Water blijft koud of is koud	Kijk of LED blauw is. Zo niet dan opnieuw warm water opstarten.	Reset en opnieuw procedure. LED uit = koud, LED blauw = warm (zie settings)
Föhn blijft koud of is koud	Kijk of LED blauw is. Zo niet dan opnieuw warm water opstarten.	Reset en opnieuw procedure. LED uit = koud, LED blauw = warm (zie settings)



Controleer bij het uitpakken bij het gebruik voor de eerste maal of er geen ongebruikelijke zaken u zijn opgevallen, zoals deuken, scheuren in het kunststof, aansluitsnoer of beschadigingen.

Mocht u deze dingen opmerken, neem dan contact met ons op.

Voor dat u contact opneemt met onze “after sales service center”, test eerst de volgende mogelijkheden. Vermeld deze antwoorden ook bij uw klacht, om de procedure te vereenvoudigen, maar probeer dan eerst de volgende vragen.

Probleem: De Tripel B werkt niet meer (doet niets en er branden geen lampjes meer)

1. Heeft u de stekker wel of goed in de wandcontactdoos gedaan.
2. Test de wandcontactdoos of er spanning op staat, door b.v. een lamp op de wandcontactdoos aan te sluiten. Als deze wel oplicht, dan staat er spanning op de wandcontactdoos. (niet de oorzaak)
3. Licht de knop na 40 seconden op de zitting niet op of reageert het niet bij het indrukken. Reset dan het systeem. Resetprocedure: door de stekker uit de wandcontactdoos te nemen, 2 minuten wachten en opnieuw in de wandcontactdoos steken. Geen verbetering, opsturen naar service adres.
4. Is deze knop blauw en als u uw hand rechts op de zitting legt, wordt deze dan rood. Als dit niet zo is, dan reset procedure herhalen. (Nog geen verbetering opsturen naar het service adres.)
5. Reageren de drie LED's op de behuizing niet op de bediening Warm / Koud instellen. (Opsturen naar service adres)

Probleem: De douche komt niet meer naar buiten.

1. Staat de waterkraan open. Zo niet: open deze dan, zodat de waterdruk op de Tripel B staat.
2. Controleer op waterlekkage (aansluitingen, enz.).
3. Controleer of het filter in het witte gedeelte van de afsluitkraan niet is verstopt.
4. Controleer of de waterdruk nog voldoende is. (>1,5 bar)

Probleem: De douche komt wel naar buiten, maar sproeit niet meer of niet meer zo goed.

1. Controleer of de sproeikop niet is verstopt door vuil op de sproeikop. Mocht dit het geval zijn dan kun je het schoonmaken met een tandenborstel. Voorzichtig de sproeikop uit de “garage trekken” en dan voorzichtig afborstelen.

Probleem: De drie LED's branden niet.

De oorzaak is dat de instelling van de Tripel B op “koud staat ingesteld”. De zitting blijft koud, en geeft geen warm water en geen warme lucht.

1. Volg de instructie om de instelling te regelen zodat zitting, het water en de lucht warm wordt. Dan wordt de nieuwe status door de drie LED's weer aangegeven.

Specificaties

	Ronde Zitting	Ovale Zitting
Aansluit kabel/keurmerk	230 V	50H
Lenge aansluitkabel	1.2 meter	1.2 meter
Waterdruk (bar)	Minimum 0.7 maximum 7.5	Minimum 0.7 maximum 7.5
Vermogen warm water	700W	700W
Vermogen warme zitting	52W	52W
Vermogen warme lucht	130W	130W
Beveiliging elektriciteit	15mA-GFCI	15mA-GFCI
<u>Maten</u>	<u>Afmetingen (mm)</u>	<u>Gewicht (KG)</u>
Tripple B - rond	470L x 385W x 107H	3.1 ± 0.3 kg
Tripple B - ovaal	520L x 385W x 107H	3.1 ± 0.3 kg
Certificering	CE-ROHS	CE-ROHS
Waterverbruik van de douchekop is 0.5 liter per minuut.		

Garantie certificaat

Uw garantie is bij ons bekend, omdat u de Tripel B op onze webshop heeft besteld.
U kunt uw melding bekend maken op de webshop onder via ons mailadres.

GARANTIE:

- De vervaardiging garantie wordt voorzien in 1 jaar vanaf de datum van aankoop (datum aflevering.).
- De garantie omvat de diensten en alle benodigde onderdelen.
- De garantie is alleen geldig als u de Tripel B op de webshop heeft besteld.
- De garantie geldt voor alle defecte onderdelen, die niet door grof geweld zijn beschadigd.
- De garantie is niet geldig, indien de installatie niet voldoet aan de voorschriften, die in de gebruikershandleiding zijn voorgeschreven, of niet voldoet aan de Tripel B genoemde aanbevelingen m.b.t... reinigen, of onderhoud.
- De garantie is vervallen als de Tripel B is gedemonteerd geweest, of is gerepareerd door niet-officiële technische dienst van Tripel B. Het gebruik is niet in overeenstemming is met de voorschriften m.b.t. het gebruik van de Tripel B.
- Onjuist is aangesloten op een spanning van 230 VAC / 50 Hz.
- Bij alle andere schade veroorzaakt door het gebruik of installatie die niet in de Tripel B gebruikershandleiding is aangegeven vervalt de garantie.
- De garantie geldt uitsluitend als de installatievoorschriften minutieus zijn opgevolgd.

CE RoHS



Dit product mag niet worden weggegooid bij ander huishoudelijk afval aan het einde van de levenscycles. Breng uw Tripel B dan naar een gecertificeerd recycling bedrijf.

Uw verkoper/adviseur:

De handleiding treft u aan op de webshop.